

Čistič vodních usazenin

(balení 250g/500g)

Použití:

1. Naplňte nerezovou nádobu 4 litry horké vody.
2. Přidejte 2 polévkové lžíce čističe.
3. Nechte otevřené víko, připojte napájení a zapněte přístroj a nechejte jej zapnutý, než se začne vařit voda.
4. Po 15-20 minutách vylijte vodu, poté nádobu vyčistěte čistou vodou.
5. Pokud je nános příliš silný, proveďte proceduru několikrát, až bude nádoba čistá.
6. Malé množství usazenin není nebezpečné, můžete přístroj používat dále.