


Balení testů TST typu Bowie Dick na jedno použití


W&H RE-ORDER CODE

T800002X


Test průniku páry pro denní použití v souladu s EN ISO 17665-1
Pro použití ve W&H **STEAM** sterilizátorech třídy B
používajících cykly při 134°C - 137°C po dobu 3,0 - 3,5 minut

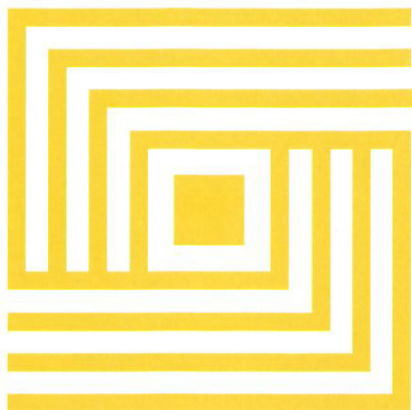


Před použitím

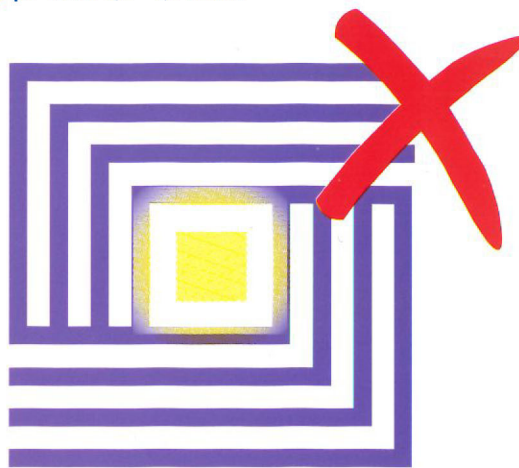

Chybný

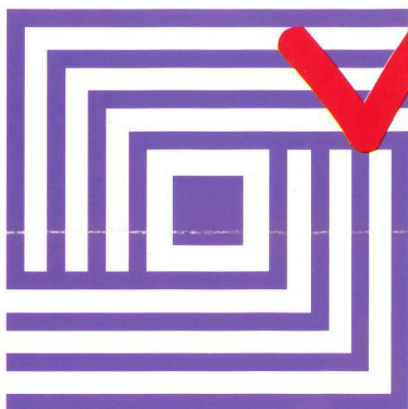

Vyhověl

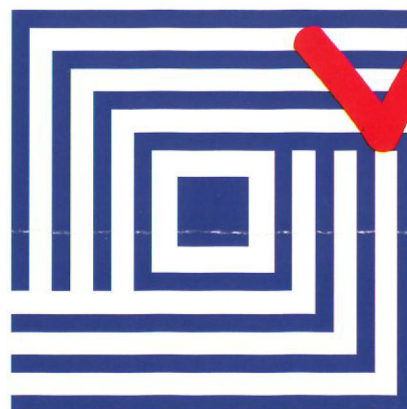

Vyhověl / 48 hodin

Po 24-48 hodinách může modrá/fialová barva testovacího listu ztmavnout.
To je zcela normální a je to způsobeno vysycháním zkušebního listu po zpracování.

Po podobné době může modrá/fialová barva testovacího listu nabýt šedé barvy (to je způsobeno nadměrným zpracováním, tj. dlouhým zahříváním a/nebo teplotou/časy překračujícími uvedené pracovní podmínky balení, což znehodnocuje test).

Návod k použití

1. Předehřejte sterilizátor.
2. Zaznamenejte příslušné informace o testovacím cyklu na vnější stranu balení TST na vyhrazené místo (pokud je to nutné).
3. Balení TST umístěte vodorovně na spodní tácek předehřátého prázdného sterilizátoru.
4. Spusťte cyklus přístroje pomocí testovacího cyklu BD/Helix ze servisního menu při teplotě 134 °C - 137 °C po dobu 3,5 - 3,5 minuty. Balení TST je třeba okamžitě vyjmout ze sterilizátoru a zkontrolovat výsledky. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože balení TST může být ještě teplé.
5. Pokud fáze odsávání vzduchu ze sterilizátoru funguje správně a umožňuje rychlý a rovnoměrný průnik páry, změní se inkoustový vzor na indikačním listu balení TST ze žluté na tmavě modrou / fialovou barvu.
6. Pokud nedošlo k rychlému a rovnoměrnému průniku páry, bude inkoustový vzor na indikačním listu TST vykazovat žlutou nebo hnědou barvu směrem ke středu balení. (Viz výše uvedený průvodce barvami.)
7. Tyto informace by měly být zaznamenány na indikační list TST balení, který by měl být poté uložen na chladném, suchém a tmavém místě mimo dosah přímého světla.

2356



W&H Sterilization S.r.l.
Italy I-24060 Brusaporto
Tel: +39-035-66 63 000
Fax: +39-035-50 96 988

BROWNE



Albert Browne Ltd
Chancery House, Rayns Way
Watermead Business Park
Syston, Leicester. LE7 1PF ■ UK
Tel: +44 (0)116 2768636 ■ Email: askalbert@steris.com

EC REP

STERIS Ireland Ltd, IDA Business and
Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865 ■ Ireland