




# DENTO-PREP™

PÍSKOVAČKA - ZAŘÍZENÍ NA ABRAZIVNÍ ČIŠTĚNÍ POVRCHU

## NÁVOD NA POUŽITÍ

### NÁVOD NA POUŽITÍ

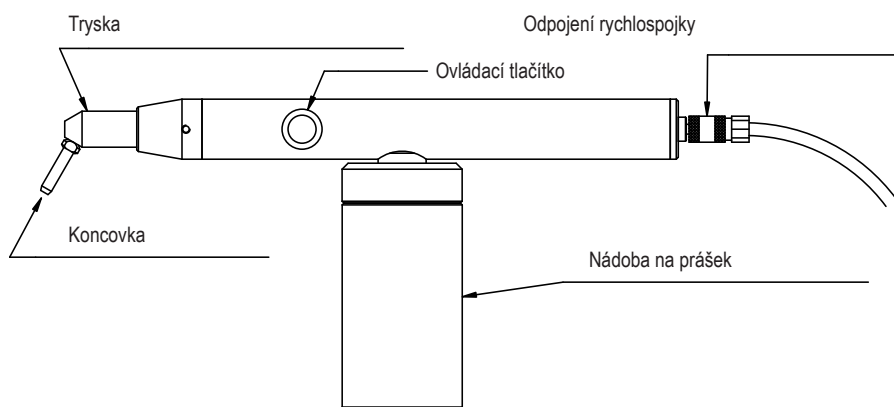

#### DENTO-PREP™ Pískovačka

Před prvním použitím přístroje byste si měly pozorně prostudovat návod k použití.

#### Popis výrobku

DENTO-PREP™ se používá spolu s aluminium-oxidovým práškem na mikroskopické pískování keramiky, kompozitu a kovových povrchů před cementací k následnému docílení dobrého tmelícího efektu.

Zařízení pracuje na základě stlačeného vzduchu od 2 do 5 kg/cm<sup>2</sup> (30 – 120 psi).

Je bezpodmínečně nutné, aby vzduch byl absolutně suchý a zbavený olejových příměsí, proto zkontrolujte, zda je hlavní přívod vzduchu opatřen filtračním zařízením.

#### Instalace

Instalace je možná více způsoby tak, aby vyhovovala různým potřebám zubních ordinací nebo laboratoří.

#### Použití konektoru

Pro snadné použití pískovačky DENTO-PREP™ v ordinaci se konektory vyrábí ve variantách pro různé druhy turbín: KaVo, W&H, Sirona, BienAir a NSK. Sejměte koncovku turbíny, zatlačte příslušný konektor do rychlospojky turbíny a připojte hadici k pískovačce. Je-li Vaše turbína jiné výroby, než shora zmíněné, použijte konektor Midwest (tj. středovýchodní normy) – se 4 standardními otvory. Tento konektor je univerzální a lze jej použít pro většinu turbín.

#### Použití instalačního setu

Pro přímé napojení přístroje DENTO-PREP™ k přívodu vzduchu jsou k dispozici dva sety pro turbínové přívody standardních rozměru 5 mm (3/16") a 6 mm (1/4"). Návod na instalaci je přiložen do balení instalačního setu.

## Doporučená abraziva

Aluminium-oxide prášek o velikosti částic 20–80 µm.  
Vlhkost a jiné částice mohou zapříčinit ucpání.

### Extraorální aplikace:

- Mikroskopické pískování, čištění a aktivace
  - korunek
  - inlejí/onlejí
  - čepů
  - Marylandských můstku
  - ortodontických kroužků a zámků
- Odstranění starých cementů před opakovanou cementací
- Očištění kovových konstrukcí

### Intraorální aplikace:

- Mikroskopické čištění před opravami z kompozitu a keramiky za použití adheziv
- Povrchové zdrsňení/čištění přirozených zubních struktur před rekonstrukcemi z kompozitu

### Bezpečnostní upozornění

Noste vždy ochranné brýle, kdykoliv používáte DENTO-PREP™. Nikdy nemiřte přímo do obličeje a na oči, miřte vždy jen na povrch, který chcete pískovat. Ústí spreje držte blíže cílovému povrchu ve vzdálenosti od 2 do 10 mm.

Zamezte vsání cizích abraziv. Noste vždy ochrannou roušku, kdykoliv používáte DENTO-PREP™.

Používáte-li DENTO-PREP™ intraorálně, doporučujeme rozhodně použít koferdam, abyste ochránili zuby a měkké tkáně.

Vždy je nutné použít chirurgickou savku: ústí savky přiložte co možná nejbližší místu, které pískujete.

### Návod

- Odšroubujte nádobu na prášek, naplňte ji aluminio-oxidovým práškem a opět zašroubujte
- Před prvním použitím DENTO-PREP™ doporučujeme vyzkoušet funkci přístroje na různých zkušebních materiálech z keramiky, kompozitu a kovu
- Nasměrujte trysku do požadovaného směru ve vzdálenosti 2-10 mm od cílového materiálu
- Nechte spínač uvolněný a pootočte tryskou malinko mimo cíl
- Stlačte spínač a stříkejte sprejem, dokud není povrch zdrsňený. Pouze pár sekund je dostačujících.
- Po použití vysypte prášek z nádoby. Vyfoukněte zpětným chodem zbytek prášku z přístroje (jak je popsáno níže u „Ucpání“)
- Rozpojte hadici
- Očistěte povrch přístroje. Nenořte DENTO-PREP™ do vody nebo jiné tekutiny, riskujete tím ucpání
- Sterilizujte v autoklávu do 135°C/275°F

### Ucpání

Ucpe-li se úzká tryska uvnitř DENTO-PREP™, je nutné ji vyčistit zpětným chodem následovně:

- odšroubujte nádobu na písek, ucpete prstem ústí trysky a stlačte knoflík

To zajistí zpětný chod stlačeného vzduchu v celém systému a vyčistí se tím všechny usazeniny

### Sterilizace

DENTO-PREP™ (přístroj a nádoba) je možné sterilizovat v autoklávu max. do 135°C/275°F. Prosím, před sterilizací odšroubujte nádobu. Po sterilizaci se ujistěte, zda je přístroj dobře vysušen před jeho dalším použitím.

### Záruka

Na přístroj DENTO-PREP™ se vztahuje 1-letá záruka jak na materiál, tak na konstrukci výrobku, s výjimkou sprej. koncovky.

Výrobce neakceptuje jakékoliv záruky na nesprávné používání přístroje.

### Manufacturer

RØNVIG Dental Mfg. A/S · Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Dagaard · Dánsko · Tel: +45 70 23 34 11 · Fax: +45 76 74 07 98  
e-mail: export@ronvig.com · www.ronvig.com

### Distributor:

HDT s.r.o., J. Dietricha 1433/58, České Budějovice 370 08, Tel: +420 387 221 441

### V případě technických problémů kontaktujte prosím distributora:

HDT s.r.o., J. Dietricha 1433/58, České Budějovice 370 08

Tel: +420 387 221 441

Mobil: +420 603 443 117

e-mail: info@hdt dental.cz, www.hdt dental.cz