

NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

RUBBER DAM tekutý

Světlem tuhnoucí tekutý ruber-dam

PŘED POUŽITÍM PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE

PRODUKT POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ

SLOŽENÍ : uretanové pryskyřice, anorganická plniva

POUŽITÍ

Světlem tuhnoucí tekutý ruber-dam je určený pro :

- ochranu dásní během dentálního ošetření jako je bělení, leptání, mikroabraze, pískování, atd.
- těsnící ruber-dam

ZPŮSOB POUŽITÍ

Pro ochranu dásní během dentálních ošetření :

Očistěte a osušte dásně. Za použití vhodných nástrojů (např. ústní a retní retraktor) znehybněte rty a jazyk, abyste předešli kontaktu s tekutinou. Odstraňte uzávěr stříkačky a připevněte přiložený jednorázový aplikátor. Aplikujte tekutý RUBBER-DAM podél aplikační plochy (4-6 mm široké a 1,5-2 mm tlusté) a zároveň dohlížejte na množství aplikovaného přípravku. Pokud je to možné, aplikujte tekutinu skrz mezizubní prostory. Vytvrzujte přípravek po dobu 15 sekund za pomoci polymerizační lampy. Proces vytvrzení provádějte rovnoměrně skenovacím pohybem. Poté poskytněte dentální ošetření. Poté, co je ošetření dokončeno, odlepte polymerizovaný RUBBER-DAM za použití nástroje a vyjměte.

Za účelem utěsnění RUBBER-DAMu :

Izolujte pracovní plochu (zub, zuby, zubní lůžko) za použití RUBER-DAMu. Za tímto účelem aplikujte vrstvu tekutiny na okraj dásní a na RUBBER-DAM. Vytvrzujte přípravek po dobu 15 sekund polymerizační lampou. Proces vytvrzení provádějte rovnoměrně skenovacím pohybem. Poté poskytněte dentální ošetření. Poté, co je ošetření dokončeno, odlepte polymerizovaný RUBBER-DAM za použití nástroje a vyjměte.

Okamžitě po použití vyjměte píst stříkačky a umístěte originální uzávěr, abyste předešli polymerizaci produktu ve stříkačce. Produkt je určen pro opakované použití, zatímco aplikátor se používá jednorázově. Opakované použití aplikátoru může vyvolat sekundární infekci.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nepoužívejte u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku.

OPATŘENÍ

Nevytvrzená substance může způsobit podráždění pokožky a očí. Opakovaný kontakt s produktem může vyvolat alergickou reakci. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě opláchněte zasažené místo vodou. Polknutí může vyvolat bolestivou reakci. Pokud k polknutí dojde, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě pod 25 °C. Nevystavujte slunečnímu záření. Po použití dobře uzavřete.

Udržujte mimo dosah dětí.

Datum expirace je uvedeno na obale.

Jakmile je obal otevřen, datum expirace se nemění, i když je obsah po každém užití řádně zabezpečen.

DOPORUČENÍ K LIKVIDACI

Použitý obal by měl být zlikvidován nebo vrácen výrobci.

BALENÍ

Stříkačka obsahující 1,2 ml produktu, jednorázové aplikátory.

Datum poslední aktualizace : 14.5.2014

Kontakt na dodavatele : Ing. Milan Kříž - Falcon , Havlíčkova 37 , 602 00 Brno

www.dentalnimaterial.cz



PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 00 48 15 842 35 85

